

## HALLUX VALGUS SCHIENE

EPITHELIUMFLEX® 02

### FUNKTIONALITÄTEN:


Die flexible Hallux valgus Korrekturschiene ermöglicht es, den großen Zeh zurückzuschieben, die Pronation einzugrenzen und somit die Antriebsphase zu optimieren. Ihr externes Band aus EPITHELIUMFLEX® verteilt den Druck und nimmt Reibungen auf dem Hallux valgus («Ballenzeh»). Das Kompressionsband um den Mittelfuß ermöglicht es, das Einquetschen und die Spreizung des Vorfußes einzugrenzen.

### VERWENDUNGSTIPPS:

- Überprüfen Sie vor allem, dass sich der große Zeh seitlich bewegen lässt. Im gegensätzlichen Fall dieses Produkt bitte nicht verwenden.
- Dieses Produkt nicht während der Nacht verwenden.
- Die Korrekturschiene kann sowohl am rechten als auch am linken Fuß getragen werden.

### ANLEGEN:

- Den Vorderfuß in das Band einführen.
- Die Kappe über den großen Zeh ziehen.
- Den Epithelium™ Pad (a) hinter dem Vallux valgus (b) platzieren. (siehe Abb. 1)

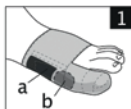

### EINSTELLEN:

- Bei der ersten Verwendung bitte nicht versuchen, die Position des großen Zehs völlig zu begrädigen.
- Im Laufe der ersten 10 Verwendungen muss der große Zeh schrittweise gerade positioniert werden, indem das Kompressionsband nach hinten gezogen wird. (siehe Abb. 2).



Für eine optimale Wirkung kann das Produkt täglich getragen werden.

### PFLEGE:

- In der Waschmaschine bei 40°C oder von Hand waschen (ohne Schrubben).
- An der Luft trocknen lassen. Nicht bügeln.

### GEGENANZEIGE:

- Unbeweglicher großer Zeh.
- Das Produkt wurde allen vorgeschriebenen Tests der ISO 10993-1 Norm, welche Produkte mit direktem Hautkontakt betreffen, unterzogen. Sollte trotzdem eine Hautreaktion auftreten, sollten Sie die Anwendung sofort unterbrechen und die Firma MILLET Innovation benachrichtigen.
- Nicht über einer offenen Wunde verwenden.
- Für Personen mit Arthritis, Diabetes, Polyneuritis, Neuropathie der unteren Extremitäten oder venösen Ulzera: Dieses Produkt keinesfalls auf einer Wunde, einer Hautverletzung verwenden, den Fuß während der Verwendung beobachten und gegebenenfalls Ihren Arzt oder Fußpfleger um Rat fragen.

**ZUSAMMENSETZUNG:** 52% Silikon, 48% Polyamid/Elasthan.

Millet Innovation übernimmt keine Haftung im Fall von unsachgemäßer Verwendung entgegen den Empfehlungen des Herstellers.




Maschinenwäsche  
40°C.  
Bleichen mit Chlor  
nicht erlaubt.



Nicht bügeln  
(kein Dampf).  
Nicht trommel-  
trocknen.



Nicht chemisch  
reinigen.  
LOSNUMMER:  
siehe Verpackung

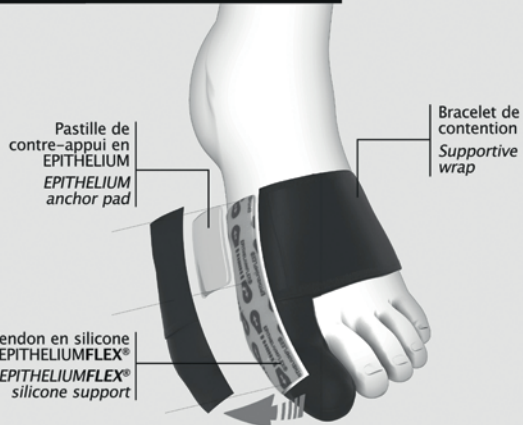

CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE DANS MOINS DE 10g  
CONCENTRATED TECHNOLOGY WEIGHING LESS THAN 10g

19374-B • 03/2015

## DÉCOUVREZ LA GAMME EPITACT® SPORT:

DISCOVER THE EPITACT® SPORT RANGE:



Produit issu de la recherche MILLET Innovation.  
Product designed by MILLET Innovation R&D.

[www.epitactsport.com](http://www.epitactsport.com)

# ORTHÈSE HALLUX VALGUS EPITHELIUMFLEX® 02

HALLUX VALGUS BRACE / HALLUX VALGUS SCHIENE / ORTESI PER ALLUCE VALGO / ORTESE HALLUX VALGUS / ORTHESE HALLUX VALGUS / ORTESIS HALLUX VALGUS / HALLUX VALGUS ORTESE / HALLUX VALGUS-ORTOS / HALLUX VALGUS-ORTEESI / HALLUX VALGUS-ORTOSE / ΟΡΘΩΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΒΛΑΙΣΟΥ ΜΕΓΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

