

BLAUE-NÄGEL-SCHUTZKAPPEN**EPITHELIUMTACT 02****INDIKATION:**

Die EPITHELIUMTACT 02 Blaue-Nägel-Schutzkappen bestehen aus einem ultraresistenten 1mm dünnen Silikongel, das den Eigenschaften der menschlichen Haut sehr ähnelt. Die Schutzkappen verteilen den Druck und fangen Mikrostoße ab, indem die Energie im Gel verteilt wird, wodurch die Entstehung von blauen Zehennägeln oder Blasen verhindert wird.

Die Schutzkappen lindern den Schmerz und die sportlichen Aktivitäten können somit auf dem gewohnten Leistungsniveau ausgeübt werden.

GEGENANZEIGE:

- Nicht über einer offenen Wunde verwenden.
- Für Personen mit Arteriitis, Diabetes, Polyneuritis, Neuropathie der unteren Extremitäten oder venösen Ulzera: Dieses Produkt keinesfalls auf einer Wunde, einer Hautverletzung verwenden, den Fuß während der Verwendung beobachten und gegebenenfalls Ihren Arzt oder Fußpfleger um Rat fragen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Vor der ersten Anwendung waschen.
- Die Schutzkappen sind **präventiv** zu verwenden. Sie eignen sich ebenfalls perfekt, wenn sich bereits ein blauer Nagel gebildet hat.
- Die Schutzkappen sollen auf trockener und sauberer Haut verwendet werden.
- Für ein einfaches Auflegen drehen Sie die Schutzkappe auf links und rollen Sie sie vom oberen Ende des Zehs nach unten ab.
- Den Schutz nicht verkürzen, da dadurch seine Widerstandsfähigkeit beeinträchtigt wird.
- Den Schutz jeden Abend abnehmen, um die Gefahr einer Mazeration zu vermeiden.
- Den Schutz in die hierfür vorgesehene graue Kunststoffhülle legen und bis zur nächsten Verwendung aufbewahren.



PFLEGE:

Die Schutzkappen können mit Wasser und Seife gewaschen werden. Nicht reiben und an der Luft trocknen lassen.

ZUSAMMENSETZUNG: 82% Silikon, 18% Polyamid/Elasthan.

Die Materialien wurden allen vorgeschriebenen Tests der ISO 10993-1 Norm, welche Produkte mit direktem Hautkontakt betreffen, unterzogen. Sollte eine Hautreaktion auftreten, sollten Sie die Anwendung sofort unterbrechen und die Firma MILLET Innovation benachrichtigen.

MILLET Innovation übernimmt keine Haftung im Fall von unsachgemäßem Gebrauch entgegen den Empfehlungen des Herstellers. Die maßgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2014.

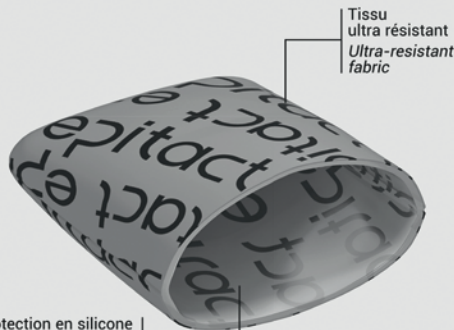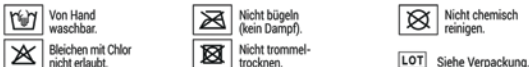

Protection en silicone
EPITHELIUMTACT
lavable et réutilisable
EPITHELIUMTACT
silicone protector
washable and reusable

ABSORPTION DES MICRO-CHOCs ET DES PRESSIONS

ABSORPTION OF MICRO-SHOCKS AND PRESSURE

DÉCOUVREZ
LA GAMME EPITACT[®] SPORT
DISCOVER
THE EPITACT[®] SPORT RANGE

www.epitactsport.com

MILLET
INNOVATION

Produit issu de la recherche MILLET Innovation.
Product designed by MILLET Innovation R&D.



MILLET Innovation - ZA Champgrand
BP64 - 26270 Lorioi/Drôme - FRANCE

PROTECTIONS ONGLES BLEUS EPITHELIUMTACT 02

TOENAIL PROTECTORS / BLAUE-NÄGEL-SCHUTZKAPPEN / PROTEZIONE PER UNGHIE LIVIDE / PROTEÇÕES UNHAS NEGRAS / BESCHERMERS TEGEN BLAUWE NAGELS / PROTECCIONES UÑAS MORADAS / TÁBESKYTTELSER MOD BLÅ NEGLE / BLÅNAGELSSKYDD / SINISTEN KYNSIEN SUOJAT / BESKYTTESPLASTER MOT BLÅ NEGLER / ΠΡΟΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΥΧΙΩΝ



19370-D - 04/2019

contact@epitact.com

www.epitactsport.com